



	Mi1200 SYNCHRONY (PIN)	Mi1210 SYNCHRONY ST	Mi1000 CONCERTO (PIN)	SONATAT1100	PULSARC1100	C40+
Röntgen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonografie (Ultraschall)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultraschall beim Zahnarzt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szintigrafie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Endoskopie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Computertomografie (CT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Magnetresonanztomografie (MRT)	✓*1	✓*1	✓*1	✓*1	✓*1	✓*1
Elektrokardiogramm (EKG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektroenzephalogramm (EEG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positronen-Emissions-Tomografie (PET)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrochirurgie beim Zahnarzt	✓*2	✓*2	✓*2	✓*2	✓*2	✓*2
Schallzahnbürsten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Professionelle Zahnreinigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rüttelplatten	✓*3	✓*3	✓*3	✓*3	✓*3	✓*3
Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4

Zusätzliche Untersuchungen:

Mammographie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laserbehandlungen	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4
Mikrowellentherapie	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4	✓*4
Herzschrittmacher/Defibrillator	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Magnetfeldtherapie	✓*5	✓*5	✓*5	✓*5	✓*5	✓*5
Bioresonanztherapie	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Informationen in dieser Tabelle wurden auf Anfrage der HCIG zur Verfügung gestellt. Sie basieren auf technischer Bewertung und gehen über die regulatorisch erforderliche Produktkennzeichnung hinaus. Regulatorisch freigegebene Informationen zu einigen medizinischen Behandlungen im Detail finden Sie im MED-EL Medical Procedures Manual sowie unter www.medel.com/isi

- *1 Die MED-EL Sicherheitshinweise sind zu beachten
- *2 nur bipolare Elektrokauteer dürfen verwendet werden
- *3 nicht direkt im Kopf- und Halsbereich anwenden
- *4 nicht im Implantatbereich anwenden
- *5 (≠ MRI) / nicht im Kopf- und Halsbereich anwenden

